

# STIFNECK - Halskrause



Schulungsunterlagen  
Der DRK Bereitschaft Süßen


# Anwendungsbereich

**Nach Verkehrsunfällen kommt es immer häufiger zu Halswirbelsäulenverletzungen.**

**Um die Rettung von verunfallten Personen möglichst schonend zu bewältigen, kann/soll der Stifneck (Halskrause) angelegt werden.**


**In den nachfolgenden Folien wird die theoretische Anwendung beschrieben.**

# 1. Den Patienten abmessen

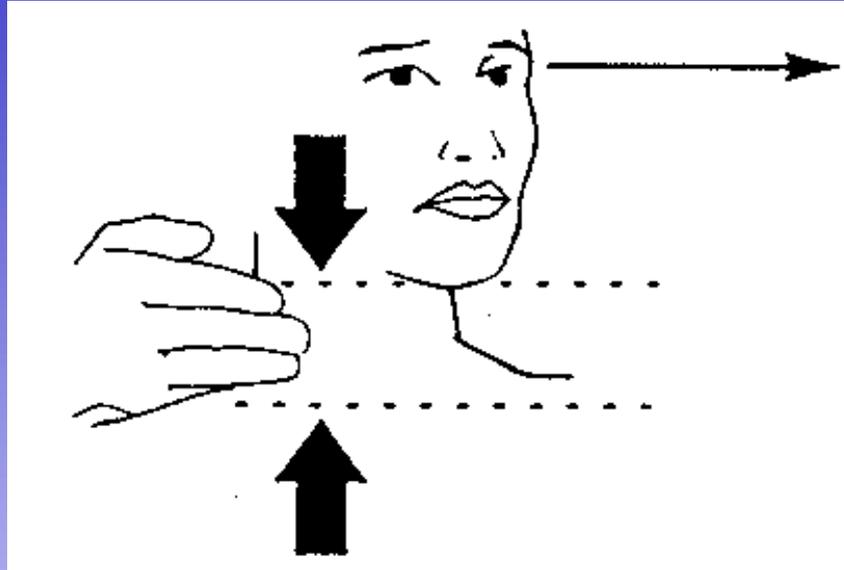


- Den Kopf mit nach vorne gerichteten Augen in die Neutralposition bringen
- Abstand Schulter - Kinn messen

## 2. Die richtige Kragengröße für den Patienten wählen

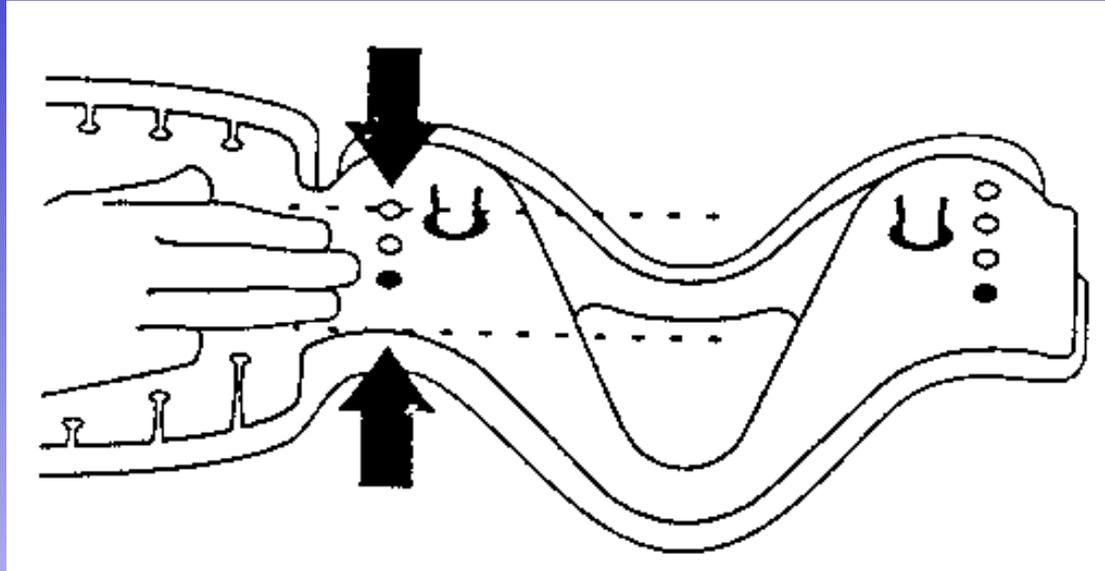


- **Zwischen den 4 Einstellungen für Erwachsene wählen**
- **Abstand Schulter - Kinn**
  - muß Abstand Kunststoffkante - Loch entsprechen
  - bzw. Abstand Kunststoffkante - schwarzer Stift, wenn der Kragen zusammengesetzt ist

### 3. Stifneck-Select Einstellbarer Kragen anpassen

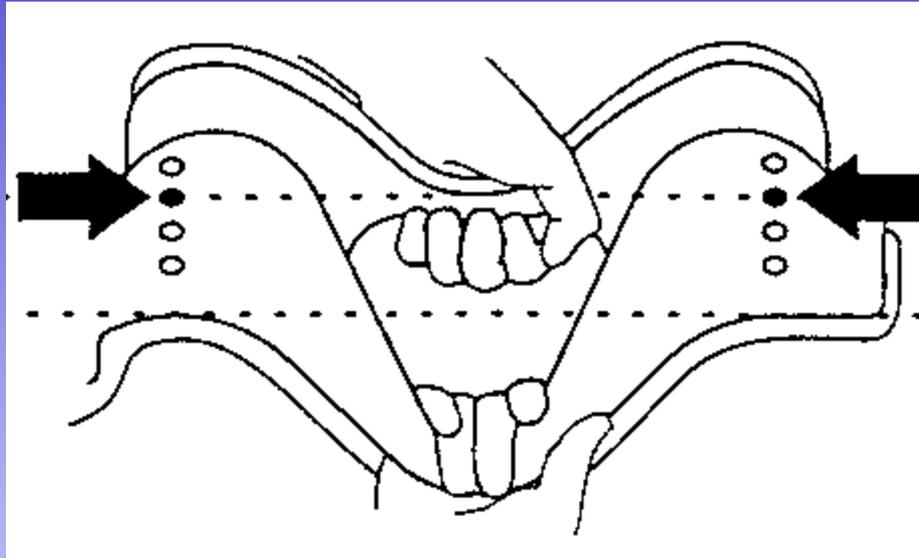


- **Die Kinnstütze auf die in Schritt 2 gewählte Größe einstellen**

### 3. Stifneck-Select Einstellbarer Kragen anpassen

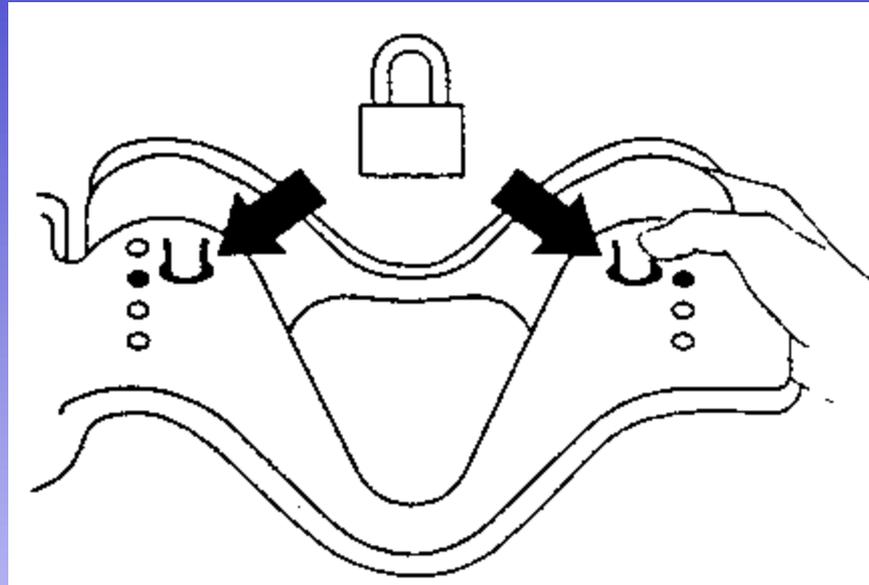


- **Beide Seiten durch Drücken der beiden Verschußblaschen verschließen**

## 4. Den Kragen verformen

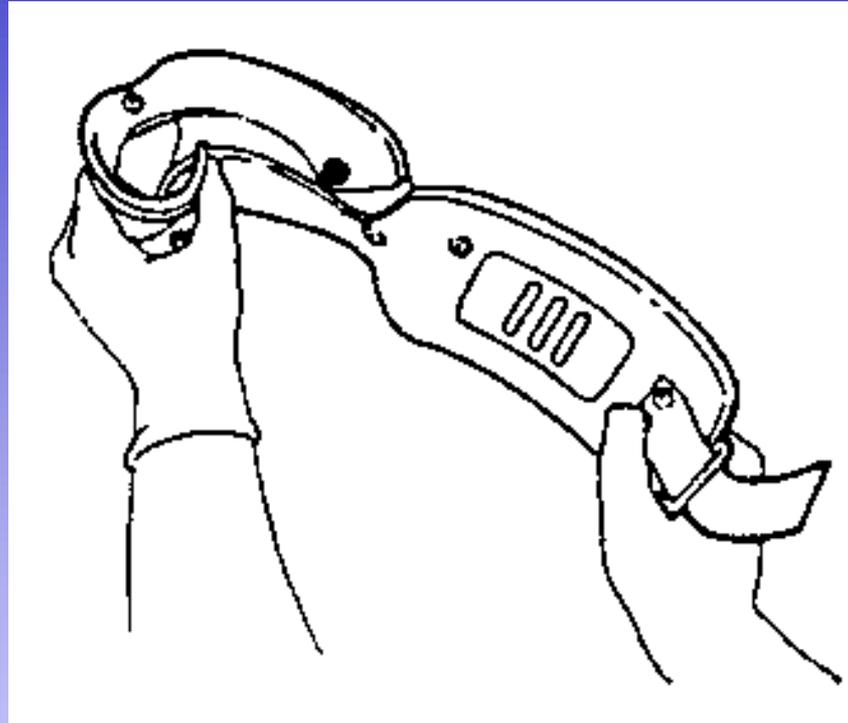

## 5. Mit dem Kopf in der neutralen Position den Kragen anbringen

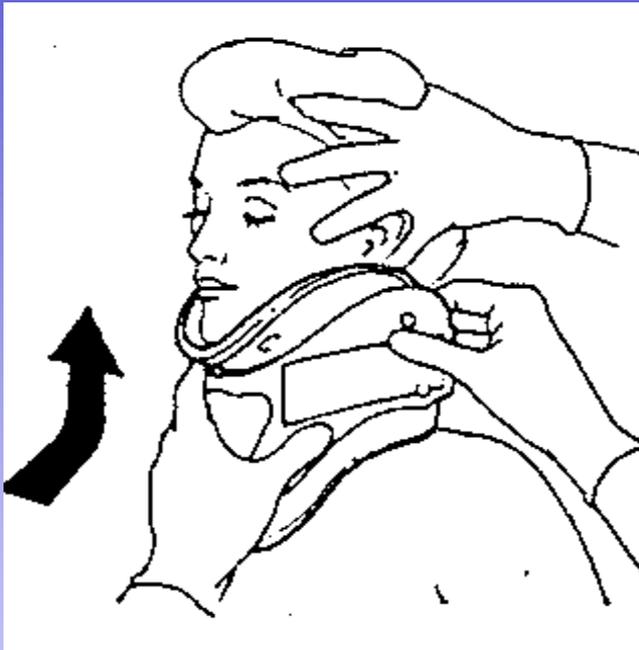

### • **Aufrechter Patient:**

- Die Kinnstütze weit unter das Kinn schieben.
- Falls eine andere Größe erforderlich ist, den
- Kragen entfernen, neuen Kragen wählen.
- Den Stifneck-Kragen wieder anbringen.


## 5. Mit dem Kopf in der neutralen Position den Kragen anbringen



- **Aufrechter Patient:**

- Die Rückseite des Kragens fest ziehen, dabei die Vorderseite festhalten, dann Klettverschluß befestigen.

## 5. Mit dem Kopf in der neutralen Position den Kragen anbringen

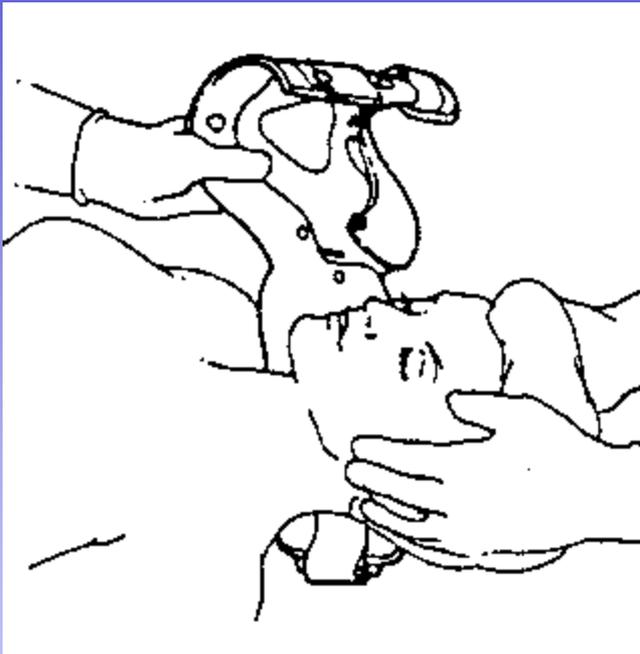

- **Liegender Patient:**

- Den Stifneck-Kragen **nicht** am Patienten einstellen

# Quellennachweis



Stifneck® Select™ Collar

**Roraco Ges.m.b.H., Wasag. 13, A1092 Wien, Tel. 011310 58 68, Fax DW 39 55**